

MANIPULADORES Y TIRADORES

- El manipulador parece y es sencillo, pero el **botón no da falsa llamada** al estar al ras la membrana.
- El botón del manipulador es **pulsable incluso alrededor del círculo** del botón...
- Incluye y se activa un **led rojo** al pulsar con el que
 - 1) localizas el aparato y
 - 2) tranquilizas al paciente de que Sí ha llamado y alguien ha recibido el aviso.
- Los manipuladores son **reparables** (hay kits para ello, repuestos para todas las piezas).
- Si se moja **no le entra el agua**, aun siendo el de telefonillo baja voz. **Son IP54**
- Tirador de goma WC tiene un **sistema antiestrangulamiento**, no te puedes ahogar con él, ya que se rompe el cable.
- Además, **las argollas** de sujetar el tirador WC **se abren** con el exceso de peso.
- Los avisos de llamadas de WC no se pueden cortar desde el puesto de enfermería, hay que hacer presencia en la habitación, son avisos de categoría superior a los normales.

NCS NURSE CALL STATION – PUESTO DE LLAMADAS DE ENFERMERÍA

- Desde el puesto de control de enfermería puedes **visualizar las presencias en las habitaciones**.
- Incluso **se puede llamar a la habitación** en la que está marcada la presencia de la enfermera/auxiliar.
- También se puede llamar a una habitación sin presencia de enfermera.
- Se **puede efectuar una llamada General** a todas las habitaciones de tu servicio (menú – anuncio – general).
- Los avisos de llamada de habitaciones se ordenan por **prioridad**.

PASILLOS

- Las lámparas de pasillo son **LED**.
- El **visual de pasillo se lee a 25 metros**.